

医療機器の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

注射筒・針用アダプタ「SS アダプター」の接続操作に関するご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

今般、弊社が製造販売しております注射筒・針用アダプタ「SS アダプター」（届出番号：12B1X10024000014）におきまして、株式会社三和化学研究所製シリンジ製剤との過嵌合が原因と考えられる苦情を受領いたしました。

本製品のご使用にあたっての注意事項は電子化された添付文書に記載しております。引き続きご留意いただきますと共に、下記重要な事項をご確認いただき、ご使用くださいますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒、よろしくお願いいたします。

謹白

記

【重要な事項】

- 注射筒との接続の際は、必要以上にねじ込まないでください。嵌合異常が発生する可能性があります。
- 装着時、アダプターの羽根部分に破損が見られる場合は、使用を中止してください。

【嵌合時注意事項】

○ 適切な嵌合例



シリンジ装着時




取り外し後

適切な嵌合が行われている場合、アダプターの羽根（シリンジとの接続に使用されるねじ山）に破損は発生しません。

× 過嵌合例



シリンジ装着時

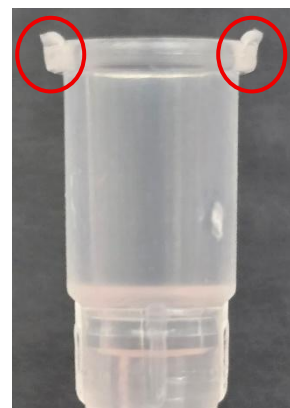


取り外し後

過嵌合により、アダプターの羽根部分とシリンジのねじ山が接触し、潰れています（赤丸部分）。

正しい接続操作の手順

- ① キャップを持ってアダプターをシリンジに挿入してください。
- ② キャップをゆっくり時計回りに回転させてください。
- ③ 回転が重くなり、「キャップが空回りする感触」がしたら回転を止めてください。

キャップ内側の突起とアダプター外側の突起が接触し、止まる感触があります。この感触に変わったら、接続完了のサインです。

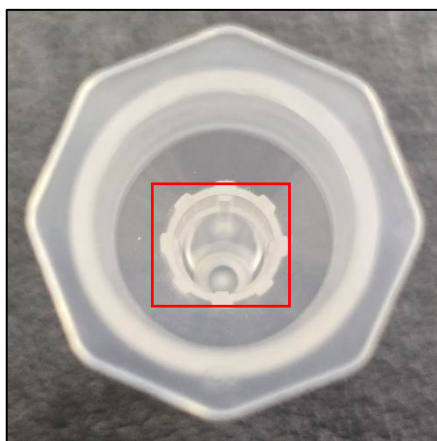

キャップ内側の突起（4 か所）



アダプター外側の突起（4 か所）

- ④ シリンジと嵌合していることを確認して、キャップを外してください。

以上

製造販売 : 創作メディカル株式会社
千葉県船橋市本町六丁目1番12号サクセスビル2F
お問い合わせ先 : 創作メディカル株式会社 品質保証部
TEL : 047-455-3564 FAX : 047-455-3565